

Anleitung für die Programmierung Ihres Rodatest 302-Handschaters für einen Testablauf nach FeV mit integriertem Kontrastsehtest.

Ihr Handschalter verfügt je nach Alter des Gerätes über ein oder neun frei programmierbare „User-Programme“:

Seriennummer 39250 bis 39806: 1 User Programm und ab
 Seriennummer 39807: 9 User Programme

Falls Ihr Gerät mit einem freien Speicherplatz ausgestattet ist, betätigen Sie die Programmtaste solange, bis USER 1 auf dem Display erscheint.

Falls Ihr Gerät mit neun freien Speicherplätzen ausgestattet ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Gerät einschalten
- Auf dem Display erscheint „G 37 – starten mit +“
- Betätigen Sie die Minus-Taste
- Auf dem Display erscheint jetzt „User 9“

Damit Sie möglichst schnell Zugriff auf Ihr FeV Programm haben, empfehlen wir Ihnen den Speicherplatz „User 9“ zu verwenden. Natürlich können Sie auch jeden beliebigen noch freien „User“ für die FeV-Programmierung heranziehen.

Beachten Sie bitte die Schritte 1 bis 5 der beigefügten Anleitung und geben Sie nun in folgender Reihenfolge die Tests für Ihr FeV-Programm ein. Die Schritte 4, 5 und 6 der beigefügten Anleitung wiederholen sich für jeden der folgenden Tests.

Testfeld Nr. mit Plus	Auge mit Taste Auge	Prüfentfernung mit den Pfeiltasten
1 Landoltringe	Rechts	Unendlich
2 Landoltringe	Links	Unendlich
3 Landoltringe	Binokular	Unendlich
4 Stereotest	Binokular	Unendlich
7 Farbttest	Binokular	Unendlich
8 Farbttest	Binokular	Unendlich
9 Farbttest	Binokular	Unendlich
10 Farbttest	Binokular	Unendlich
34 Kontrast 40 %	Binokular	Unendlich
33 Kontrast 20%	Binokular	Unendlich
22 Kontrast 10 %	Binokular	Unendlich
23 Kontrast 5%	Binokular	Unendlich

Mit Schritt 8 – M-Taste zwei Sekunden gedrückt halten – speichern Sie den kompletten Testablauf dauerhaft ab und mit Schritt 9 beenden Sie die Programmierung.

Anlagen:
 Testbogen als Kopiervorlage
 Auszug aus Rodatest Gebrauchsanweisung - Seite 35

Juni, 2011