


5.14

Sehtest USER 1-9.

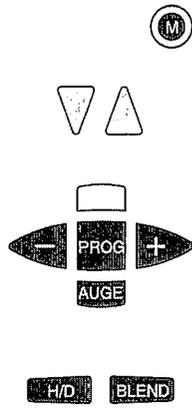

Eingabe einer benutzerdefinierten Testfolge (USER 1-9).

Definieren Sie Ihre eigenen Testabläufe, die in der Folge über USER 1-9 abrufbar sind. 50 Einzelsehtests stehen Ihnen dafür jeweils zur Verfügung. Nehmen Sie die Programmierung der Sehtests USER wie folgt vor:

Schritt 1		Taste "PROG" (mehrfach) drücken, bis der Sehtest USER erscheint, den Sie programmieren wollen, z.B. USER1:
Schritt 2		Taste "M" (Memory) für ca. 2 Sekunden gedrückt halten bis in der Anzeige folgende Frage erscheint:
Schritt 3	 oder 	Mit der Taste "+" (JA) bestätigen Sie, daß Sie mit der Aufzeichnung einer Testfolge beginnen wollen (Achtung: Bisher gespeichertes Programm wird gelöscht!). In der Anzeige erscheint: Mit der Taste "-" (NEIN) brechen Sie den Vorgang ab und Sie verlassen den Eingabe-Modus.
Schritt 4		Durch (mehrfaches) Drücken der Taste "+" die gewünschte Testfeld -Nummer anwählen.
Schritt 5	 	Testbedingungen eingeben (siehe Seite 34). - Zu testendes Auge: rechts, links, binokular - Entfernung usw.
Schritt 6		Einstellungen durch Drücken der Taste "M" speichern. Die Anzeige "U-PRG" zählt um eine Stufe weiter. Der nächste Test kann eingegeben werden.
Schritt 7		Schritte 4 und 5 wiederholen, bis der gewünschte Testablauf vollständig ist.
Schritt 8		Taste "M" (Memory) für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, bis in der Anzeige folgende Frage erscheint:
Schritt 9	 oder 	Taste "-" (NEIN) erlaubt die Fortsetzung der Auswahl und Eingabe von Tests. Taste "+" (JA) beendet die Programmierung. Die eingegebene Testfolge ist jetzt vollständig gespeichert und künftig unter der Bezeichnung USER1 aufrufbar.
		Wenn der Speicher voll ist, erscheint folgende Anzeige: Beenden Sie die Aufzeichnung durch Drücken der Taste "+".